



# PHOVIA

<p>Powierzchnowe zapalenie skóry</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania.* • Energia światła fluorescencyjnego.</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 2 do 3 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Marchegiani</p>
<p>Głębokie zapalenie skóry</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania.* • Energia światła fluorescencyjnego.</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 4 do 6 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Pin</p>
<p>Bakteryjne zapalenie skóry i ropnie</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania.* • Energia światła fluorescencyjnego • Odpowiednie rozpoznanie podstawowych zaburzeń jest kluczowe dla skutecznego zarządzania tą chorobą.</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 4 do 6 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Fantini</p>
<p>Hot spot</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania.* • Energia światła fluorescencyjnego. • Odpowiednie rozpoznanie podstawowych zaburzeń jest kluczowe dla skutecznego zarządzania tą</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 1 do 2 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Co-</p>
<p>Zapalenie skóry z wylizywania i ziarniaki</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania • Energia światła fluorescencyjnego. • Odpowiednie rozpoznanie podstawowych zaburzeń oraz rozważenie wszelkich możliwych komponentów behawioralnych są kluczowe dla skutecznego zarządzania tą chorobą.</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 4 do 6 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Fantini</p>
<p>Zapalenie skóry na modzelach</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania.* • Energia światła fluorescencyjnego. • Odpowiednie rozpoznanie podstawowych zaburzeń jest kluczowe dla skutecznego zarządzania tą chorobą.</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 4 do 6 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Pin</p>
<p>Ropnie odbytu i przetoka okołoodbytuwa</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania.* • Energia światła fluorescencyjnego.</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 4 do 8 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Briand</p>
<p>Zapalenie skóry fałdów skórnych</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania.* • Energia światła fluorescencyjnego.</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 2 do 4 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Deleporte</p>
<p>Rany pourazowe</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania. • Energia światła fluorescencyjnego. • Wszystkie martwe tkanki powinny zostać usunięte z rany poprzez oczyszczenie. • Upewnij się, że leczenie obejmuje margines 2-3 cm</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 4 do 6 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Marchegiani</p>
<p>Nacięcia chirurgiczne</p>	<p>Częstotliwość</p>	<p>Długość leczenia</p>	
<p>• Standard postępowania.* • Energia światła fluorescencyjnego. • Upewnij się, że leczenie obejmuje margines 1 cm zdrowej tkanki.</p>	<p>→ Raz w tygodniu (dwa kolejne zastosowania)</p>	<p>→ 1 do 2 tygodni</p>	<p>Źródło zdjęcia: Dr Horn</p>

\*Energia światła fluorescencyjnego MOŻE BYĆ UŻYWANA Z RÓWNOLEGLYM STOSOWANIEM LEKÓW TAKICH JAK: antybiotyki- używane jako pierwszy rzut • Szampony miejscowe, antybiotyki, leki przeciwzapalne • Antybiotyki doustne, miejscowe, iniekcje • Leki przeciwzapalne / immunosupresyjne, przeciwwiędrowe, oklacytynib, kortyzon, cyklosporyna, lokiwetamab i takrolimus